



## ASIENTO ELEVADOR DE INODORO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

[www.elevaclic.es](http://www.elevaclic.es)

Battery DL2



# ASIENTO ELEVADOR DE INODORO

## MANUAL DE INSTRUCCIONES


Para asegurar un uso correcto de este aparato y para su seguridad, por favor, lea esta manual completamente antes de empezar a instalarlo y utilizarlo.



## DIMENSIONES

### Precauciones antes de la instalación:


- Mida primero el ancho del inodoro que debe ser inferior a 45 cm.
- El espacio a ambos lados del inodoro debe ser como mínimo de 12 cm.
- El ángulo de elevación es de 30°, esta área debe estar libre de objetos y obstáculos.

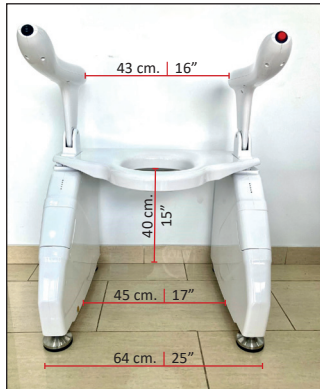

## ACCESORIOS



A - Tornillos de bloqueo del pasamanos x2

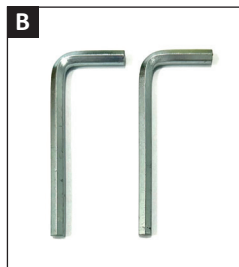

B- Llave Allen para pasamanos x2



C- Mando a distancia x1



D - Tornillos de fijación para inodoro x2



E - Llave hexagonal para fijación al inodoro x1



F - Cargador x1

## ESPECIFICACIONES

### Especificación del producto:

- Fuente de alimentación para cargar las baterías **220-240 V CA, 50-60 Hz**.
- Voltaje de trabajo **24 v**.
- Potencia nominal **130 w**.
- Las baterías pueden subir y bajar una vez llenas **120 veces**.
- Grado de impermeabilidad **IP44**.
- Angulo de inclinación **30°**.
- Requisitos de instalación. Ancho del inodoro **<45 cm**.
- Carga máxima **220 kg**.
- Peso del producto: **25 kg**.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- La superficie de este producto está hecha de plástico de ingeniería de alta resistencia, se puede limpiar con un paño húmedo.
- No utilizar productos abrasivos para su limpieza, no enjuagar con agua.
- La unidad principal no requiere mantenimiento ni lubricación.
- Evite que la barra elevadora de empuje de la unidad principal se moje.
- En caso de utilizarse por varias personas, recomendable la desinfección en cada uso.

## FUNCION DEL PRODUCTO



### Botón de elevación

con un clic, posición opcional derecha o izquierda.




### Botón de alarma

con un clic, posición opcional derecha o izquierda.

## MONTAJE Y AJUSTE DE LAS PATAS

1. Las patas se pueden subir y bajar de 0 a 15 cm.
2. Ajuste la altura de las patas del elevador de modo que la viga transversal trasera coincida y se ajusta a la altura de su inodoro y que el elevador este nivelado en la posición baja.
3. Una vez tenga la altura deseada y la nivelación correcta, gira y sube la tuerca hasta dejarla colocada en la parte superior de la pata.
4. Aprieta la tuerca con una llave fija plana suavemente hasta dejarla fijada y bien sujeta.

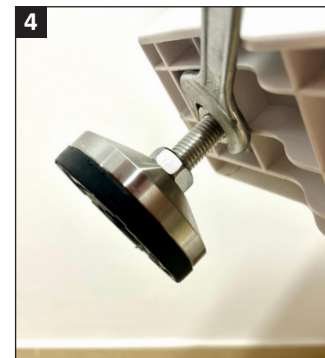

## INSTALACION Y MONTAJE DE LOS APOYABRAZOS

Conecte el cable de alimentación del brazo al cable de la estructura. Alinea la conexión y aprieta el collar, asegure que coincide la conexión, como se muestra en la imagen.



Alinee la dirección del apoyabrazos como se muestra en la imagen **(A)** y luego empújelo hacia adentro, en la ranura, luego bloquéelo hacia abajo **(B)**. A continuación, asegure el apoyabrazos al cuerpo principal de la estructura con los tornillos contrabloqueos **(C)**. Apriételo con la llave Allen **(D)**.



### FIJACION DE LA ESTRUCTURA AL INODORO

1. Desatornille el asiento y la tapa del inodoro, dejando solamente la base de cerámica.
2. Coloque los pasadores de goma negros en los dos orificios del inodoro.
3. Retire la cubierta protectora de plástico blanca de la viga transversal de la estructura, para quitarla, tire verticalmente de la cubierta de plástico, fije los pasadores a la pieza metálica plana con el perno largo, desplace la estructura hacia el inodoro.
4. Alinee la placa de metálica con el orificio del inodoro, usando la llave Allen y 2 tornillos, fije la viga transversal a los soportes metálicos planos fijados a los pasadores.



**Recuerde:** Vuelva a colocar la cubierta protectora de la viga transversal en su posición original.



## ACERCA DE LAS BATERIAS


### Métodos de carga:

Este producto está equipado con dos baterías de gran capacidad y funciona de forma independiente, no necesita fuente de alimentación externa.

1. La luz azul esta encendida cuando está completamente cargada. La cantidad de luces verdes representa la energía restante de la batería. Cuando esta encendida la luz roja, necesita carga, cárguelo lo antes posible.

2. Cuando el control remoto no se utilice un tiempo prolongado, apague el interruptor de recepción, mantenerlo encendido consumirá energía continuamente.

Preste atención al uso razonable para garantizar la larga vida útil de las baterías.

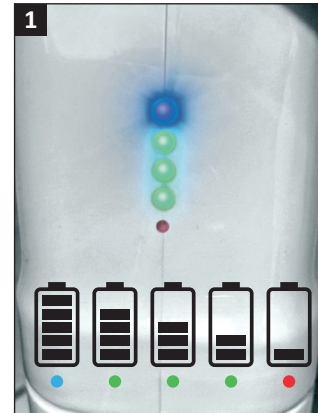

## NOTAS, ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- 1- Lea atentamente las instrucciones de esta manual completamente.
- 2- Los usuarios con capacidades físicas limitadas necesitan supervisión o asistencia al utilizar este producto.
- 3- Antes de usarlo, confirme que todos los componentes están correctamente ensamblados y apretados.
- 4- No exceda la capacidad máxima de carga del producto, que es de 220 Kg.
- 5- El pasamanos está diseñado para facilitar el agarre al estar de pie o sentado, use ambos lados simultáneamente.
- 6- No apoye todo su cuerpo corporal en un solo apoyabrazos, distribúyalo uniformemente en ambos lados, con cada lado soportando la mitad de su peso.
- 7- La sobrecarga de peso puede provocar daños en el pasamanos y romperse.
- 8- No se suba sobre el producto.
- 9- Manténgalo alejado de fuentes de calor.
- 10- Mantenga la carga de las baterías como mínimo al 30% para su buen funcionamiento.
- 11- Cualquier incidencia relacionada con este producto debe comunicarse al distribuidor.
- 12- Medio ambiente: Este aparato cuando llegue al final de su vida útil, no debe ser considerado basura normal, sino residuo peligroso y contaminante, como tal, debe ser depositado en las zonas de reciclaje y eliminación específico, según directiva 2024/884/UE (RAEE).



## GARANTIA Y EXCLUSIONES DE GARANTÍA

### Garantía:

- El fabricante garantiza que este producto se suministra sin defectos.
- Todos los productos cuentan con la garantía oficial del fabricante por un periodo de 3 años, conforme a la normativa vigente. La batería tiene una garantía de 2 años.
- Para hacer uso de la garantía, será necesario aportar la factura de compra.
- En caso de avería importante antes de 1 año de la fecha de compra, reemplazamos sin costes para el cliente, no reparar. Para asistencia postventa, contáctenos [info@elevaclic.es](mailto:info@elevaclic.es)



### Exclusiones de garantía:

1. Las piezas de repuesto no suministradas por el fabricante o distribuidor autorizado. Si faltan piezas o están en mal estado, contáctenos.
2. Los fallos de la unidad que no sean causadas por defectos de material o del proceso, como las derivadas de un uso indebido o los daños causados por la mano de obra de su instalación.
3. El desgaste natural, el reemplazo regular de piezas, roturas o daños causados por influencias externas.
4. Los daños causados por la inobservancia de las instrucciones de uso, incumplimiento de las instrucciones de instalación.
5. El fabricante y el distribuidor no se responsabilizan de daños accidentales, daños a la propiedad, ni pérdidas materiales.
6. Las condiciones de la garantía son claras y explícitas, garantizando los derechos e intereses de los consumidores y ofreciendo una sólida garantía para cada cliente.



**DISTRIBUIDO POR:** **AZULCOR GESTION, S.L.U.**

C.P. 41520 - EL VISO DEL ALCOR, SEVILLA  
ESPAÑA

TLF. +34 649641255

[info@elevaclic.es](mailto:info@elevaclic.es) / [www.elevaclic.es](http://www.elevaclic.es)

Fabricado en R.P. China

El distribuidor se reserva el derecho a realizar modificaciones y mejoras a su producto, así como a ligeras variaciones de color. No se admiten responsabilidades por errores de impresión ni de traducción.