



ELEVADOR DE ASSENTO SANITARIO

MANUAL DE INSTRUÇÕES

www.elevaclic.es

Battery DL2



ELEVADOR DE ASSENTO SANITARIO

MANUAL DE INSTRUÇÕES


Para garantir o uso correto deste dispositivo e para sua segurança, por favor, leia este manual na íntegra antes de começar instale e utilize.



DIMENSÕES

Precauções antes da instalação:


- Primeiro, meça a largura da sanita; deve ser inferior a 45 cm/17".
- O espaço de cada lado da sanita deve ser de pelo menos 12 cm - 6".
- O ângulo de inclinação é de 30°; esta área deve estar livre de objetos e obstáculos.

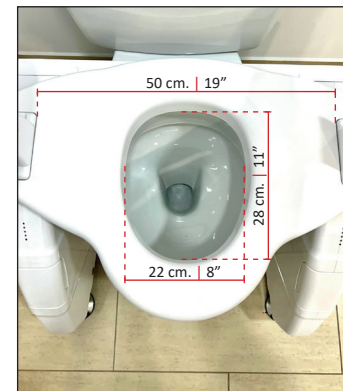

ACESSÓRIOS



A - Parafusos de fixação do corrimão x2

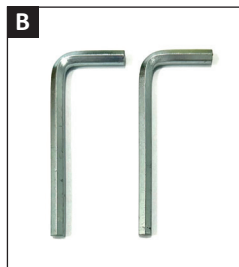

B - Chave Allen para corrimão x2



C - Comando remoto x1



D - Parafusos de fixação para sanita x2



E - Chave sextavada para fixação de sanita x1



F - Carregador x1

ESPECIFICAÇÃO

Especificações do produto:

- Fonte de alimentação para carregamento de baterias: **220-240 V CA, 50-60 Hz.**
- Tensão de funcionamento: **24 V.**
- Potência nominal: **130 W.**
- As baterias podem ser elevadas e baixadas **120 vezes** com uma única carga.
- Classificação de impermeabilidade **IP44.**
- Ângulo de inclinação de **30°.**
- Requisitos de instalação: Largura da sanita **<45 cm <17"**.
- Carga máxima: **220 kg.**
- Peso do produto: **25 kg.**

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- A superfície deste produto é feita de plástico de engenharia de alta resistência e pode ser limpa com um pano húmido.
- Não utilize produtos de limpeza abrasivos nem enxague com água.
- A unidade principal não requer manutenção ou lubrificação.
- Evite molhar a barra de empurrar da unidade principal.
- Se utilizado por várias pessoas, recomenda-se a desinfecção após cada utilização.


FUNÇÃO DO PRODUTO



Botão de elevação
com um clique, posição
opcional à direita ou à
esquerda.



Botão de alarme
com um clique, posição
opcional à direita ou à
esquerda.

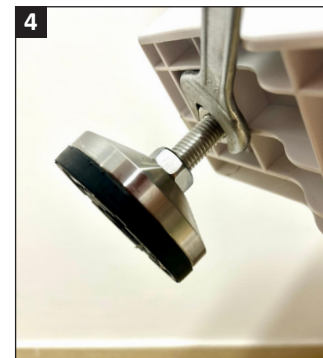

MONTAGEM E REGULAÇÃO DOS PÉS

1. Os pés podem ser elevados e baixados de 0 a 15 cm - 6".
2. Ajuste a altura dos pés do elevador de modo a que a travessa traseira coincida e se ajuste à altura da sua sanita e o elevador fique nivelado na posição baixada.
3. Depois de atingir a altura desejada e com a perna nivelada, rode e levante a porca até que este fique posicionado no topo
4. Aperte a porca cuidadosamente com uma chave de bocas até que esteja segura e firme no lugar.

INSTALAÇÃO E MONTAGEM DOS APOIOS DE BRAÇO

Ligue o cabo de alimentação do braço ao cabo da estrutura. Alinhe a ligação e aperte a braçadeira, garantindo que a ligação corresponde à imagem.



Alinee la dirección del apoyabrazos como se muestra en la imagen **(A)** y luego empújelo hacia adentro, en la ranura, luego bloquéelo hacia abajo **(B)**. A continuación, asegure el apoyabrazos al cuerpo principal de la estructura con los tornillos contrabloqueos **(C)**. Apriételo con la llave Allen **(D)**.




FIXANDO A ESTRUTURA AO VASO SANITÁRIO

1. Desaperte o assento e a tampa da sanita, deixando apenas a base em cerâmica.
2. Insira os pinos de borracha pretos nos dois orifícios da bacia da sanita.
3. Remova a cobertura de plástico branca de proteção da viga transversal da estrutura, para a remover, puxe a cobertura de plástico na vertical, fixe os pinos à peça metálica plana com o parafuso comprido. mova a estrutura em direção à casa de banho.
4. Alinhe a placa metálica com o orifício da sanita e, utilizando a chave Allen e 2 parafusos, fixe a travessa aos suportes metálicos planos fixos aos pinos.



Lembre-se: volte a colocar a tampa de proteção da travessa na sua posição original.

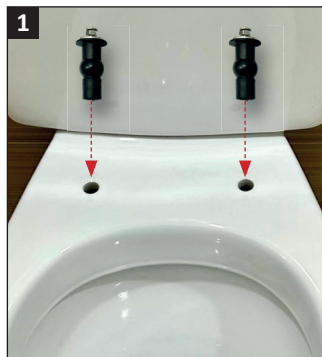

SOBRE AS BATERIAS



Métodos de carregamento:

Este produto está equipado com duas baterias de alta capacidade e funciona de forma independente; não necessita de uma fonte de alimentação externa.

1. A luz azul acende quando a bateria está totalmente carregada. O número de luzes verdes acesas representa a carga restante. Quando a luz vermelha acende, a bateria necessita de ser carregada; carregue-a o mais rapidamente possível.

2. Quando o telecomando não estiver a ser utilizado durante um longo período, desligue o interruptor do recetor; mantê-lo ligado consumirá energia continuamente.

Utilize a bateria de forma adequada para garantir uma maior duração.

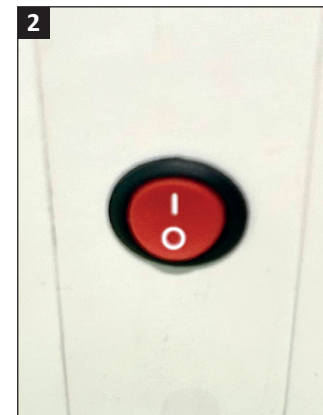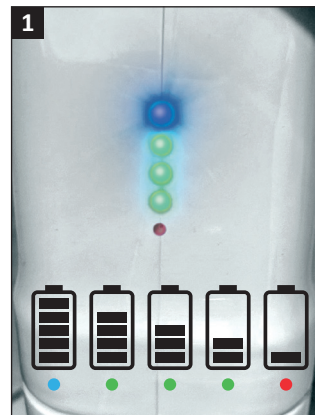

NOTAS, AVISOS E PRECAUÇÕES

- 1- Leia atentamente todas as instruções deste manual.
- 2- Os utilizadores com capacidades físicas limitadas necessitam de supervisão ou auxílio ao utilizar este produto.
- 3- Antes de utilizar, verifique se todos os componentes estão montados e apertados corretamente.
- 4- Não exceda a capacidade máxima de carga do produto, que é de 220 Kg.
- 5- O corrimão foi concebido para facilitar o manuseamento tanto em pé como sentado; utilize ambos os lados em simultâneo.
- 6- Não apoie todo o seu peso num único apoio de braço; distribua-o uniformemente pelos dois lados, de modo a que cada lado suporte metade do seu peso.
- 7- Sobrecarregar o produto pode danificar ou partir o corrimão.
- 8- Não suba para o produto.
- 9- Mantenha afastado de fontes de calor.
- 10- Mantenha a carga da bateria a um mínimo de 30% para um funcionamento adequado.
- 11- Quaisquer problemas relacionados com este produto devem ser comunicados ao distribuidor.
- 12- Ambiente: Quando este aparelho chega ao fim da sua vida útil, não deve ser considerado lixo comum, mas sim resíduo perigoso e poluente, devendo, por isso, ser depositado em áreas específicas de reciclagem e deposição, de acordo com a diretiva 2024/884/UE.



GARANTIA E EXCLUSÕES DE GARANTIA

Garantia:

- O fabricante garante que este produto é fornecido sem defeitos.
- Todos os produtos estão cobertos pela garantia oficial do fabricante por um período de 3 anos, de acordo com as normas em vigor. A bateria tem uma garantia de 2 anos.
- Para acionar a garantia, terá de apresentar o comprovativo de compra.
- Em caso de defeito grave no prazo de um ano a contar da data da compra, substituiremos o artigo sem custos para o cliente; não o consertaremos. Para suporte pós-venda, por favor contacte-nos info@elevaclic.es



Exclusões da garantia:

1. Peças de substituição não fornecidas pelo fabricante ou distribuidor autorizado. Caso alguma peça esteja em falta ou apresente defeito, por favor contacte-nos.
2. Falhas da unidade não causadas por defeitos de material ou de fabrico, tais como as resultantes de uma utilização indevida ou de danos causados por uma instalação incorreta.
3. Desgaste natural, substituição regular de peças, quebra ou danos causados por influências externas.
4. Danos causados pela não observância das instruções de utilização ou instalação.
5. O fabricante e o distribuidor não se responsabilizam por danos acidentais, danos materiais ou perdas de bens.
6. As condições de garantia são claras e explícitas, garantindo os direitos e interesses dos consumidores e oferecendo uma garantia sólida para cada cliente.



DISTRIBUÍDO POR: **AZULCOR GESTION, S.L.U.**

C.P. 41520 - EL VISO DEL ALCOR, SEVILLA

ESPAÑA

TLF. +34 649641255

info@elevaclic.es / www.elevaclic.es

Fabricado na R.P. China

O distribuidor reserva-se o direito de efetuar modificações e melhorias no seu produto, bem como ligeiras variações de cor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tradução.